

nip® Nasensauger

Hilft bei verstopften Kindernäschen

nip Artikel-Nr.: 37074

Altersangabe: 0 Monate +



Mögliche Bild- und Mediadaten:



Produktbeschreibung Stichpunkte

- zum sanften Absaugern von Nasensekret
- Saugadapter aus angenehm weichem Polypropylen
- breite Adapterform verhindert ein zu tiefes Eindringen in die Nase
- einfache Handhabung
- leichte Reinigung
- ab 0 Monaten geeignet

So einfach geht's:

1. Pumpball zusammendrücken und den Adapter vorsichtig an das Nasenloch führen
2. Inzwischen das andere Nasenloch mit dem Finger leicht zuhalten
3. Den Druck auf den Pumpball langsam lockern, das Nasensekret wird dabei sanft abgesaugt

Produktbeschreibung Fließtext

Der nip® Nasensauger hilft bei verstopften Kindernäschen. Die Saugspitze gewährleistet ein sanftes, schmerzloses Absaugen von Nasensekret. Die Saugspitze sowie der Pumpball können problemlos gereinigt werden. Die breite Adapterform verhindert ein zu tiefes Eindringen in das Näschen, saugt schonend ab um die empfindlichen Nasenschleimhäute nicht zu reizen. Um eine gleichbleibende Markenqualität zu garantieren ist der nip® Nasensauger BPA frei und wie fast alle Produkte der Marke nip® „Made in Germany“. Mehr bei www.nip.family